



Zen-0

Langdurige zuurstoftoediening is een erkende zorgmethode voor veel patiënten met chronische stabiele hypoxemie waarbij de oorzaak vaak aandoeningen aan de luchtwegen zijn. De duur en de kwaliteit van leven van patiënten neemt evenredig toe met de duur van de zuurstoftoediening. Zen-0 is een hoogwaardige draagbare zuurstofconcentrator waarmee patiënten thuis of onderweg zuurstof krijgen toegediend.

Toedienen naar behoefte

Door de technologie van Zen-0, kan het apparaat naar behoefte van de patiënt tot twee liter zuurstof per minuut toedienen. Tevens kan men kiezen voor 0-6L/min in de pulse modus. Andere apparaten geven een continue, vaste hoeveelheid zuurstof af. Zen-0 laat de hoeveelheid toe te dienen zuurstof daarentegen toenemen als de patiënt sneller gaat ademen.



Technische gegevens

Afmetingen (BxDxL)	212mm x 168mm x 313mm
Gewicht	4,66kg met één cell-batterij
Concentratie	87% - 96% bij alle standen
Maximale zuurstofafvoerdruk	20,5 psi
Alarmtypes	Lage zuurstofconcentratie, Geen ademhaling gedetecteerd, Batterij bijna leeg, Service vereist
Gebruiksduur batterij	Tot vier uur met één batterij of acht uur met twee batterijen bij 18 ademhalingen per minuut
Instelling	In pulse modus van 1 tot 6, in continue modus van 0,5 tot 2 in te stellen in stappen van 0,5

Gebruiksvriendelijk

De Zen-0 is ontworpen met het oog op de patiënt, en is gebruiksvriendelijk dankzij de intuïtieve knopbediening en het lcd-scherm.

Dubbele functie

Met Zen-0 hebben patiënten het beste van beide werelden. Patiënten kunnen bij de zuurstoftoediening wisselen tussen de continue modus en de pulse modus.

Duurzaam en betrouwbaar

Zen-0 kan tegen een stootje. Het apparaat is voorzien van drie jaar garantie of 15.000 totale gebruiksuren. Daarmee weet u zeker dat u een betrouwbaar kwaliteitsproduct in handen heeft.

Eenvoudig te vervangen zeefbedden

Zen-0 is voorzien van zeefbedden die eenvoudig kunnen worden vervangen door thuiszorgmedewerkers, zonder dat het apparaat retour moet worden gestuurd naar een distributeur.

